

Bacoban®



Alkoholhaltige Desinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und anderen Flächen

(gemäß Richtlinie 93/42/EWG; MDD)

VAH-gelistet



Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
125ml Flasche	24 Flaschen/Karton	BAC125
250ml Flasche	6 Flaschen/Karton	BAC250
500ml Flasche	12 Flaschen/Karton	BAC500
1-l-Flasche	6 Flaschen/Karton	BAC1000
5-l-Kanister	1 x 5 l	BAC5000
Desinfektionstuch	einzel	BACDES
Desinfektionstücher	10 Stück in Faltschachtel	BACDEBO
Desinfektionstücher	1500 Stück lose im Karton	DES1500

Produkt-Typ

Gebrauchsfertiges, alkoholbasiertes Flächendesinfektionsmittel auf der Basis eines Polykondensats, einer quaternären Ammoniumverbindung und natriumhaltigem Pyrithion. Bacoban® ist frei von Aldehyden und Phenol.

Anwendungsgebiet

Desinfektion von alkoholbeständigen medizinischen Flächen gemäß Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte) und Oberflächen aller Art in Kliniken, Arztpraxen, Rehabilitationseinheiten und Altenheimen. Insbesondere in Bereichen, in denen eine effiziente und lang anhaltende Hygiene gefordert wird. Besonders geeignet für Bereiche, in denen durch Mikroorganismen unangenehme Gerüche entstehen, wie Toiletten und sanitäre Einrichtungen. Bacoban kann in kritischen und sensiblen Bereichen der Pharma- und Kosmetikindustrie eingesetzt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Bacoban® wirkt gegen: Bakterien (einschl. Mykobakterien), Pilze, Hepatitis B und C Viren, Vakzina, BVDV, HIV, Rotaviren und Adenoviren, Influenzavirus einschließlich H5N1 und H1N1.

Produktkenndaten:

100 g Lösung enthalten: Ethanol 49,4 g, Isopropanol 7,1 g, Benzalkoniumchlorid 0,71 g, Natriumpyrithion 0,05 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser. Formaldehydfrei. Phenolfrei.

Physikalisch-chemische Daten:

Aussehen: transparente Flüssigkeit
 Viskosität (DIN 53211): 42 sec bei 2 mm Öffnung
 pH-Wert (Mischung in Wasser 1:1): 5
 Dichte: 0,89 g/cm³
 Prüfung gemäß DGHM-Richtlinie (hohe organische Belastung)

Prüfung gemäß DGHM-Richtlinie (hohe organische Belastung)

Wirksamkeit	15 sek.	30 sek.	1 min.	5 min.	15 min
Prüfung gemäß DGHM -Richtlinie: Bakterien und Pilze				X	
Mykobakterien					X
Begrenzt viruzid (gemäß Empfehlung RKI / DVV) einschl. HBV, HCV, HIV, Influenza, BVDV und Vaccinia		X			
Rotaviren	X				
Adenoviren			X		

Prüfung gemäß **EN**-Richtlinien:

Wirksamkeit	5 min.	15 min.
DIN EN 1040	X	
DIN EN 1275	X	
DIN EN 1276	X	
DIN EN 14348		X

Nachhaltiger antimikrobieller und Virus inaktivierender Effekt bis zu 10 Tage geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180

Wichtig!

Die langanhaltende antimikrobielle Wirkung von Bacoban® darf nicht dazu führen, notwendige Desinfektionsmaßnahmen bei sichtbaren und/oder fraglichen Kontaminationen zu unterlassen!

Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinie.

- R11** Leicht entzündlich
- R 52-53** Schädlich für Wasserorganismen
- S9** Behälter an gut belüftetem Ort aufbewahren
- S16** Vor Hitze schützen
- S33** Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen
- S35** Abfälle und Behälter in gesicherter Weise beseitigen

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



Anwendungshinweis

Gebrauchsfertige Lösung. Zur Gewährleistung einer guten desinfizierenden Leistung, die Flüssigkeit gleichmäßig dünn verteilen und auf vollständige Benetzung achten und anschließend trocknen lassen. Nicht mit anderen Reinigern oder Zusätzen mischen. Beim Einsatz von zu großen Volumina oder auf transparenten Oberflächen kann nach dem Abtrocknen ein sichtbarer Film entstehen. Dieser kann leicht durch handelsübliche saure oder alkalische Reiniger entfernt werden.

Kann auf allen alkoholbeständigen Oberflächen verwendet werden. Bei fraglich empfindlichen Oberflächen empfehlen wir eine Beständigkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle. Aufbewahrung nur im geschlossenen Gefäß. Kühl und trocken lagern. Nur im vollständig entleerten Zustand kann das Behältnis dem Recycling zugeführt werden. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Unter Beachtung der örtlichen und behördlichen Vorschriften einer geeigneten Entsorgung zuführen.

Sicherheitshinweis:

Die Berufsgenossenschaft schreibt beim Umgang mit Gefahrstoffen geeignete Schutzkleidung vor. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser abwaschen. Nicht verschlucken. Augenkontakt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen oder Schleimhäuten gründlich mit Wasser spülen und bei Unwohlsein Arzt kontaktieren. Von Kindern fernhalten.

Biozid Reg.Nr: N-23123